

LIGHTWAVE ADVANCE: Resuelve gradual y fácilmente sin alguna molestia el problema del vello superfluo.



### LA DEPILACIÓN PROFESIONAL UN MERCADO EN CONTINUO DESARROLLO

El mercado de la depilación profesional está viviendo un momento de grande desarrollo. La demanda de tratamientos completos en zonas de grandes superficies: (piernas, espalda, etc.) así como la de prestaciones específicas en partes delicadas y de reducidas dimensiones (rostro, ingle, etc.) está aumentando. Esta tendencia se refiere indistintamente a ambos sectores del mercado: (femenino y masculino).

### LIGHTWAVE ADVANCE Y LA TECNOLOGÍA "LUZ DE ALTA ENERGÍA"



Lightwave Advance emplea la más avanzada tecnología de luz de alta energía para efectuar tratamientos profesionales de epilación. Consiguientemente no es un generador láser sino una fuerte fuente de luz con amplio espectro de emisión de 590 a 980 nanómetros.

### UN MÉTODO DE EPILACIÓN VELOZ, SEGURO Y EFICAZ RAYOS DE MUY CORTA DURACIÓN



El método de epilación Lightwave Advance se basa sobre la emisión controlada de energía luminosa de alta intensidad. La luz de alta energía es emitida en forma de rayos de muy corta duración y es absorbida por los tejidos pilíferos, sensibles al espectro de emisión, convirtiéndose en energía térmica con efectos gradualmente depilatorios (principio de fototermólisis selectiva).

### EXTREMA FACILIDAD DE APLICACIÓN

#### TRATAMIENTOS EN SUPERFICIES DE GRANDES Y REDUCIDAS DIMENSIONES



La aplicación del tratamiento resulta fácil, práctica y veloz en superficies de grandes, medias y pequeñas dimensiones. La forma particular del cabezal y la amplia apertura de emisión facilitan el desarrollo del trabajo permitiendo optimar la duración del tratamiento.

### TRATAMIENTOS PLACENTEROS EN COMPLETA RELAJACIÓN

#### DESCANSEN VUESTROS OJOS Y RELAJEN VUESTROS CLIENTES



Olviden los clásicos tratamientos de depilación, con el método Lightwave Advance evitan fatigar vuestros ojos..... donde vuestros clientes les agradecerán la rapidez y el confort de las aplicaciones.

### LA LUZ DE ALTA ENERGÍA ES ALTAMENTE EFICAZ LOS RESULTADOS APARECEN PROGRESIVAMENTE



Normalmente, como en el caso de los otros sistemas de epilación profesional, el tratamiento tiene que ser repetido varias veces antes de obtener el resultado ideal. El número de las sesiones depende de las particulares características de cada sujeto (tipo de vello, de piel, fases de crecimiento, etc.) y en la mayoría de los casos es posible alcanzar buenos resultados con 6/10 sesiones.

### LA FUNCIÓN ADICIONAL FOTO-REJUVENECEDORA



Como función adicional el Lightwave Advance además puede ser utilizado para tratamientos anti-edad Foto-Rejuvenecientes. La delicada bio-estimulación de la luz estira, tonifica y reafirma los tejidos, contrastando el envejecimiento cutáneo, para una piel más luminosa y suave al tacto.

### AVANTGARDE TECHNOLOGIES: INVESTIGACIÓN, NOVEDAD Y EXPERIENCIA

Los equipos de la serie Avantgarde aplican métodos de tratamiento avanzados y exclusivos y están íntegramente pensados y proyectados por los investigadores del Cerri Beauty Equipment de Milán, empresa especializada en la producción de metodologías y equipos para usos estéticos con más de 48 años de experiencia específica en el sector.

ART. 2241/1 LIGHTWAVE ADVANCE  
Se aconseja la aplicación del tratamiento en los sujetos con piel clara pertenecientes a los fototipos 1, 2 y 3.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia de la luz emitida: de 590 a 980 nm.  
Dimensiones del punto luminoso (spot): 10 cm<sup>2</sup>  
Energía emitida en la entera zona de irradiación: de 20 a 50 J./flash  
Duración del impulso luminoso: 30 msec.  
Duración de la lámpara: mín. 25.000 flash  
Potencia absorbida: 800 w.  
Alimentación: 230 v. - 50 Hz.  
Dimensiones del cuerpo de la máquina: cm. 50 x 36 x 21,8 h.  
Dimensiones totales con carro: cm. 50 x 56,2 x 110 h.

Sistemi per estetica, benessere e cosmetici • Saune e vasche idromassaggio



The Wellness Experience

20144 Milano - (Italy) - Via Panizza 9 - Tel. (+39) 02.4692586 r.a. - Fax (+39) 02.463986 - www.cerri.it - e-mail: info@cerri.it

AVANTGARDE es el Sector de Investigación y Desarrollo de CERRI



Produttore  
aderente  
alla  
F.A.P.L.B.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto esteriore possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto esteriore possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto esteriore possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Solarium • Poltrone e lettini • Vaporizzatori • Scaldacera • Arredamenti e progetti



HAIR  
REMOVAL

LIGHTWAVE ADVANCE

# La Richiesta: Risolvere progressivamente

La Demanda:

Resolver progresivamente

# il problema dei peli superflui

el problema del vello superfluo

## Il Sistema:

El Método:

## LIGHTWAVE ADVANCE

AVANTGARDE è il Settore di Ricerca e Sviluppo della



Since 1958

## La Depilazione Professionale Un mercato in crescita

Il mercato della depilazione professionale sta vivendo un momento di grande sviluppo. E' in crescita la domanda di trattamenti completi su zone di grandi dimensioni (gambe, dorso, spalle, etc.) come anche la richiesta di servizi specifici su aree delicate di ridotte dimensioni (viso, inguine, etc.). Questa tendenza riguarda entrambi i segmenti (femminile e maschile) del mercato.

## Il Lightwave Advance E la tecnologia a Luce Pulsata

Il Lightwave Advance utilizza la più avanzata tecnologia a luce pulsata per effettuare trattamenti professionali di depilazione. Non è quindi un generatore laser, ma una forte sorgente di luce con ampio spettro di emissione da 590 a 980 nanometri.



## Trattamenti piacevoli in totale relax

*Riposate i vostri occhi  
e rilassate i vostri clienti*

Dimenticate i classici trattamenti di depilazione, con il sistema Lightwave Advance eviterete di affaticare i vostri occhi...mentre i vostri clienti vi ringrazieranno per la rapidità ed il confort delle applicazioni.

## Estrema facilità di applicazione Trattamenti su aree di grandi e ridotte dimensioni

L'applicazione del trattamento risulta facile, pratica e veloce su zone di grandi, medie e ridotte dimensioni. La particolare forma del manipolo operativo e l'ampia superficie della finestra di emissione facilitano ergonomicamente lo svolgimento del lavoro consentendo di ottimizzare i tempi di seduta.

## Un metodo di depilazione veloce, sicuro ed efficace

*Lampi di brevissima durata*

Il sistema di depilazione Lightwave Advance si basa sull'emissione controllata di energia luminosa ad alta intensità. La luce pulsata è emessa sotto forma di lampi di brevissima durata e viene assorbita dai tessuti piliferi, sensibili allo spettro di emissione, trasformandosi in energia termica con effetti progressivamente depilanti (principio di fototermodisi selettiva).

## La Luce Pulsata è altamente efficace

*I risultati appaiono  
gradatamente*

Normalmente, come nel caso delle altre metodologie di depilazione professionale, il trattamento deve essere ripetuto alcune volte per raggiungere un risultato ottimale. Il numero delle sedute dipende dalle particolari caratteristiche di ogni soggetto (tipo di pelo, di pelle, ciclo di ricrescita, etc.) e nella maggior parte dei casi è possibile raggiungere buoni risultati con 6/10 applicazioni.

Anche  
per  
ampie  
zone



Manipolo  
con ampia  
superficie  
di emissione



Piacevole  
azione  
antietà

## La funzione accessoria di: PHOTORINGIOVANIMENTO

Come funzione accessoria il Lightwave Advance può essere utilizzato anche per trattamenti anti-età di Photoringiovanimento. La delicata biostimolazione della luce distende, tonifica e ricompatta i tessuti, contrastando l'invecchiamento cutaneo, per una pelle più luminosa e morbida al tatto.

## Ricerca, Innovazione, Esperienza

I macchinari della serie Avantgarde applicano metodiche di trattamento avanzate ed esclusive e sono interamente pensati e progettati dai ricercatori della Cerri Beauty Equipment di Milano, azienda specializzata nella produzione di metodologie e macchinari ad uso estetico con oltre 48 anni di esperienza specifica nel settore.

**ART. 2241/1 LIGHTWAVE ADVANCE**  
L'applicazione del trattamento è consigliata per i soggetti con pelle chiara appartenenti ai fototipi 1,2 e 3.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
Frequenza della luce emessa: da 590 a 980 nm.  
Dimensioni dello spot: 10 cm<sup>2</sup>  
Energia emessa sull'intera zona di irraggiamento: da 20 a 50 J./flash  
Durata impulso luminoso: 30 msec.  
Durata della lampada: almeno 25.000 flash  
Potenza assorbita: 800 w.  
Alimentazione: 230 v. - 50 Hz.  
Dimensioni corpo macchina: cm. 50 x 36 x 21,8 h  
Dimensioni totali con carrello: cm. 50 x 56,2 x 110 h

